



EMPRESA DE SALUD

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

Formato:

PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE

FLUJOGRAMA	N°	QUE	QUIÉN	DONDE	CUANDO
	1	Colocarse los elementos de protección personal de aseo necesarios	Bacteriologo(a)	Laboratorio Clinico	Antes de iniciar limpieza y desinfeccion
	2	Alistar los implementos de aseo	Bacteriologo(a)	Laboratorio Clinico	Antes de iniciar limpieza y desinfeccion
	3	Preparar los productos	Bacteriologo(a)	Laboratorio Clinico	Antes de iniciar limpieza y desinfeccion
	4	Limpiar la superficie del equipo	Bacteriologo(a)	Laboratorio Clinico	Dos veces por semana
	5	Desinfectar la superficie del equipo	Bacteriologo(a)	Laboratorio Clinico	Dos veces por semana
	6	Dejar actuar el desinfectante	Bacteriologo(a)	Laboratorio Clinico	Dos veces por semana

ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA

ESCALERILLAS

CÓDIGO:

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/07/2016

COMO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	PUNTO DE CONTROL	BARRERAS DE SEGURIDAD
Colóquese tapabocas, gafas, gorro, delantal impermeable, guantes.	Contacto con fluidos corporales		Usar los elementos de protección personal.
Aliste los implementos que va a utilizar: cepillo, paños (min. dos), detergente multienzimático líquido, desinfectante, balde con agua. Verifique que se encuentren limpios, secos y en buen estado.	utilización de elementos en mal estado		Usar los elementos de protección personal.
En un recipiente con dosificador realice la preparación de la siguiente forma: por cada litro de agua adicione 10 ml del detergente enzimático	utilización de elementos en mal estado	Ficha técnica productos de limpieza	Usar los elementos de protección personal.
Realice la aspersión del detergente sobre un paño el cual debe quedar humedecido, frote unidireccionalmente por todo el equipo. Deje actuar por mínimo 5 min. Retire el exceso de producto lavando el paño en un balde con agua.	Irritación ocular		Usar los elementos de protección personal.
Realice la aspersión del desinfectante por todo el equipo. Deje actuar por mínimo 5 min. Este se evaporará y no dejará residuos.	Irritación ocular		Usar los elementos de protección personal.
Deje actuar el desinfectante por al menos un minuto antes de guardar el equipo, retire el exceso de humedad en caso de ser necesario	No completar el periodo de actuación del producto		